

PROCEDURA ESECUZIONE UREA ¹³C BREATH TEST HELICOBACTER PYLORI

1. Raccolta del campione di espirato basale (prima dell'assunzione dell'urea marcata)

- Il paziente inspira profondamente aria
- Il paziente, elimina la prima parte dell' aria inspirata nell'ambiente, poi soffia direttamente nella sacca contrassegnata con 00-Minute .
- Tappare immediatamente la sacca. Assicurarsi che si ben chiusa.

2. Assunzione della soluzione di urea marcata

- Versare direttamente il contenuto della bustina di acido citrico nel flaconcino dell'urea ¹³C.
- Versare nel flaconcino dell'urea ¹³C acqua fino a riempirlo.
- Agitare delicatamente il flaconcino e dare da bere al paziente.

3. Raccolta del campione di espirato dopo 30 minuti

- Il paziente resta in attesa, seduto, senza fumare, bere, mangiare per 30 minuti.
- Il paziente inspira profondamente aria.
- Il paziente, elimina la prima parte dell'aria inspirata nell'ambiente, poi soffia direttamente nella sacca contrassegnata con 30-Minute .
- Tappare immediatamente la sacca. Assicurarsi che si ben chiusa.